



LumiBian Behandlungskonzept

Für Gesicht, Dekolleté & Nacken

www.pacific-spirit.de

LumiBian Behandlung Schritt-für-Schritt- Anleitung

1. Vorbereitung (2–5 Minuten)

Reinigen Sie die Haut der Kundin oder des Kunden im Gesicht, am Hals, Nacken oder den gewünschten Körperpartien sorgfältig. Optional kann ein leichtes Serum, Öl oder eine passende Pflege aufgetragen werden, um die Gleitfähigkeit zu verbessern und die Wirkung der Behandlung zu unterstützen.

Gerät vorbereiten & Aufwärmphase (ca. 3–5 Minuten)



5-stufige Wärme

Schalten Sie den LumiBian Massager ein und wählen Sie die gewünschte Wärmestufe. Lassen Sie das Gerät einige Minuten aufheizen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Wärmestufen-Empfehlung:

- Stufe 1-2:
Gesichtsanwendungen (sanfte, angenehme Wärme)
- Stufe 3-5: Nacken, Schultern, Dekolleté oder stärkere Muskelpartien

Warten Sie, bis der Bian-Stein die Temperatur vollständig aufgebaut hat, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

Grundmassage mit Bian-Stein-Wärme (8–12 Minuten)

Führen Sie den LumiBian langsam und gleichmäßig über die vorbereitete Haut.

Arbeiten Sie in ruhigen, ausstreichenden Bewegungen ohne starken Druck.

- Im Gesicht: von der Gesichtsmitte nach außen arbeiten
- Am Körper: entlang der Muskelverläufe von Nacken und Schultern

Die Wärme des Bian-Steins unterstützt ein tief entspannendes Gefühl und kann Spannungsbereiche angenehm lockern.



Rotlicht-Anwendung (5–10 Minuten)

Aktivieren Sie zusätzlich die Rotlichtfunktion (615-618 nm).

Führen Sie das Gerät ruhig und gleichmäßig über die gewünschten Bereiche.

- Ideal im Gesicht für ein gepflegt wirkendes Hautbild
- Besonders wohltuend im Nacken- und Schulterbereich
- In Kombination mit Pflegeprodukten besonders effektiv als „Glow-Phase“

Vibrations-Finish (3–5 Minuten)

Schalten Sie die sanfte Vibration hinzu.

Führen Sie langsame, ausstreichende Bewegungen aus, um die Behandlung abzurunden.

Optional kann hier eine leichte Lymph- oder Entspannungsmassage integriert werden.

Abschluss

Entfernen Sie überschüssige Pflegeprodukte bei Bedarf sanft und lassen Sie sie als Abschlusspflege einziehen.

Empfehlen Sie der Kundin oder dem Kunden, die Haut nach der Behandlung in Ruhe nachwirken zu lassen.



Anwendungshinweise für Fachkunden

- Immer mit niedriger Wärmestufe beginnen und individuell steigern
- Aufwärmzeit des Geräts unbedingt einplanen (nicht direkt am Kunden starten)
- Wärmestufen gezielt je nach Körperbereich auswählen
- In Kombination mit Seren oder Ölen besonders effektiv
- Ideal als Zusatzmodul in Gesichts- oder Wellnessbehandlungen
- Der LumiBian Massager ist ein kosmetisches Wellnessgerät zur Entspannung und Hautpflegeunterstützung. Keine medizinische Anwendung.